

Upute za uzimanje uzoraka konjske dlake

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA konja stranom DNA te kako bi kvaliteta i količina DNA bila zadovoljavajuća za potrebe testa.

Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

A. Priprema

1. Ako uzimate dlake od više konja, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka.
2. UPOZORENJE: korijene iščupanih dlaka nikako ne dodirujte prstima.
3. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad uzimate uzorke DNA. Uspješnost testiranja je puno veća ako je uzorak svjež.

B. Uzimanje uzorka

1. Iščupajte 30-40 dlaka sa korijenom iz grive ili repa. Nikako ne slati slomljene ili odrezane dlake.
2. NAPOMENA: pri čupanju dlake primite što bliže koži kako bi bili sigurni da će te iščupati i korijen.
3. Iščupane dlake stavite u kuvertu.
4. Ako šaljete uzorke od više konja, dlaku od svakog konja stavite u posebnu kuvertu.
5. Zatvorite kuvertu i na nju napišite identifikacijske podatke konja.

C. Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kuvertu sa konjskom dlakom u novu omotnicu te pošaljite na adresu:

AnimaLabs

P.P. 357

10 001 ZAGREB

HRVATSKA