

Upute za uzimanje uzoraka krvi

Uzimanje uzorka krvi ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa ili testa na patogene. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka životinje te kako bi kvaliteta i količina uzorka bila zadovoljavajuća za potrebe testa.

VAŽNO: uzorkovanje krvi treba obaviti veterinar.

Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

A. Priprema

1. Ako uzimate uzorke od više životinja, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka i koristite rukavice.
2. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad ih uzimate.

B. Uzimanje uzorka

1. Koristite novu sterilnu iglu za svaku životinju.
2. Prikupite 0,5 do 1mL ne-koagulirane krvi u epruvetu s EDTA.
3. Nježno promiješajte krv s antikoagulansom okretanjem epruvete nekoliko puta.
4. **NAPOMENA:** koagulirana krv nije prikladna za analizu.
5. Epruvetu s krvi stavite u kuvertu i zatvorite.
6. Na kuvertu napišite identifikacijske podatke uzorka.
7. U slučaju da uzorke ne šaljete odmah pohranite ih na 4°C do trenutka slanja, no uzmite u obzir da uspješnost testiranja puno veća ako je uzorak svjež.

C. Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kuvertu sa epruvetom u kuvertu sa zračnim jastucima kako ne bi došlo do oštećenja epruvete prilikom transporta te pošaljite na adresu:

AnimaLabs

P.P. 357

10 001 ZAGREB

HRVATSKA