

## Upute za uzimanje uzoraka ljske jajeta

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA ptice stranom DNA te kako bi kvaliteta i količina DNA bila zadovoljavajuća za potrebe testa.

Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

### A. Priprema

1. Ako uzimate ljske jajeta od više ptica, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka.
2. UPOZORENJE: ne dirajte unutrašnju stranu jajeta.
3. Budite spremni poslati uzorke dan nakon uzimanja uzoraka.

### B. Uzimanje uzorka

1. Uklonite ljsku jajeta čim se ptica izlegne.
2. Označite ljsku na vanjskoj površini kako bi spriječili zamjenu ljsaka.
3. Pažljivo očistite ljsku od izmeta navlaženim papirnatim ručnikom.
4. Ljska jajeta se treba sušiti na zraku otprilike 24 sata i mora biti suha iznutra i izvana.
5. Stavite ljsku u malu kartonsku ili plastičnu kutiju kako se ne bi zdrobila prilikom transporta.
6. Na kutiju napišite identifikacijske podatke ptice.
7. Ako šaljete uzorke od više ptica, svaku ljsku stavite u posebnu kutiju.

### C. Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kutiju sa ljskom u novu omotnicu te pošaljite na adresu:

AnimaLabs

P.P. 357

10 001 ZAGREB

HRVATSKA