

## Wangenabstrich Sammelanweisungen

Die Durchführung eines Wangenabstriches ist das kritischste Element bei der Entnahme der besten Probe für DNA Tests. Es ist wichtig, dass Sie diese einfache Anleitung befolgen, um Kontaminierung mit Fremd-DNA, sowie die Risiken eines Misserfolges zu vermeiden.

Wir raten Ihnen dringend dazu, die Anleitung zur Probennahme vor dem Wangenabstrich an Ihrem Haustier durchzulesen.

### A. Vorbereitungen

1. Mehrere Stunden vor dem Wangenabstrich sollte das Haustier von Spielzeugen oder anderen Objekten, die von mehreren Hunden geteilt werden, isoliert werden. Inspizieren Sie den Mund Ihres Hundes um sicher zu gehen, dass keine Essensreste oder anderes Material im Maul verbleiben und spülen Sie es wenn nötig aus. Geben Sie Ihrem Hund in diesem Zeitraum kein Essen oder Trinken.
2. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Innenseite des Mundraumes Ihres Haustiers mit den eigenen Händen.
3. Wenn Sie Proben bei mehreren Haustieren entnehmen, beenden Sie zunächst die gesamte Probenentnahme beim ersten Tier, bevor Sie mit dem nächsten beginnen. Waschen Sie Ihre Hände zwischen den verschiedenen Probenentnahmen, oder wechseln Sie die Handschuhe, falls Sie welche verwenden.
4. **WICHTIG:** Sobald ein Probestäbchen aus der sterilen Verpackung entnommen wurde, dürfen Sie damit nichts anderes außer der Innenseite des Mundraumes Ihres Haustieres berühren.
5. **HINWEIS:** Welpen sollten aufgrund möglicher Kontaminierung durch Zellen der Mutter vor der Probennahme entwöhnt werden. Wenn die Welpen noch nicht entwöhnt wurden, sollten Sie die Welpen mindestens zwei Stunden vor Probenentnahme von der Mutter trennen und das Maul der Welpen mit Wasser auswaschen. Füttern Sie die Welpen nicht, geben Sie ihnen jedoch viel zu trinken.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie die Proben noch am Tag der Probenentnahme verschicken können.

### B. Probenentnahme

1. Verwenden Sie zwei Probestäbchen, eines für jede Backenseite.
2. Öffnen Sie die Tupferpackung vorsichtig und achten Sie darauf, dass Sie mit der Tupferspitze nichts berühren. Entnehmen Sie einen sterilen Tupfer aus der Schutzverpackung.
3. Führen Sie den Tupfer zwischen Wange und Zahnfleisch Ihres Haustieres ein. Üben Sie leichten Druck von außen aus und bewegen Sie den Tupfer in einer vor-zurück Bewegung im Inneren des Maules. Rotieren Sie den Tupfer mindestens 20 Sekunden lang.

4. Lassen Sie den Tupfer 5 Minuten lang an der Luft trocknen, bis dieser vollständig getrocknet ist. Sie können den Tupfer leicht wedeln, dürfen jedoch nicht darauf pusten!
5. Stecken Sie den Tupfer direkt in den beiliegenden Umschlag.

**WICHTIG:** Um die Gefahr der Kontamination mit Bakterien oder Schädigung der DNA zu reduzieren, sind die vollständig getrockneten Tupfer unmittelbar in den beiliegenden Umschlag zu legen. Sollten die Tupfer feucht in den Umschlag gelegt werden, besteht die Gefahr der Kontamination mit Bakterien oder der Schädigung der DNA.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 mit einem zweiten Tupfer in der anderen Backe. Stecken Sie den Tupfer dann in denselben Umschlag.
7. Verschließen Sie den Umschlag und füllen Sie die Informationen auf der Außenseite des Umschlags aus.
8. Die Proben sollten bis zum Versand bei 4°C gelagert werden. Bedenken Sie, dass der Test erfolgreicher ist, je frischer die Probe ist.

### **C. Versenden der Probe**

9. Laden Sie sich das Bestellformular von der Download Seite unserer Webseite herunter. Füllen Sie die Informationen elektronisch oder manuell aus, drucken Sie das Formular und unterschreiben Sie es. Achten Sie auf gut lesbare Schrift, wenn Sie das Formular per Hand ausfüllen.
10. Stecken Sie das Bestellformular und den Umschlag mit den Probetupfern in einen neuen Umschlag und senden Sie diesen an unsere Adresse:

AnimaLabs

P.P. 357

10 001 ZAGREB

CROATIA