



Upute za uzimanje brisa usne sluznice štapićem

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA životinje koju testirate stranom DNA i drugim kontaminantima. Praćenje uputa osigurava zadovoljavajuću kvalitetu i količinu DNA za potrebe testa.

Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.



Priprema

1. Izolirajte životinju od drugih životinja, igračaka i ostalih izvora kontaminacije usne šupljine nekoliko sati prije uzimanja uzorka. Pregledajte životinji usta kako bi bili sigurni da nema ostataka hrane i drugih materijala te joj isperite usta ako je potrebno. Ne dajte životinji jesti barem sat vremena prije uzorkovanja.
2. Pazite da rukama ne dodirujete unutrašnjost usne šupljine životinje. Prilikom uzorkovanja možete koristiti rukavice od lateksa (opcija, nisu dostupne u kitu).
3. Ako uzimate uzorke više životinja, prvo završite postupak od početka do kraja za jednu životinju prije nego nastavite s drugom. Operite ruke prije te između svakog uzimanja te zamijenite rukavice ako ih koristite.
4. **UPOZORENJE:** Vrhom sterilnog štapića nikako ne dodirujte ništa osim originalnog pakiranja, unutrašnjosti usne šupljine životinje te oмотnice za pohranu štapića.
5. **SAVJET:** Mladunčad ne smije sisati barem 24 sata prije uzimanja uzorka. Ako mladunci nisu prestali sisati, odvojite ih barem dva sata prije uzimanja uzorka DNA. Mladunčad ne smije jesti, ali mora piti puno vode u tom periodu. Dodatno im isperite usnu šupljinu vodom neposredno prije uzimanja uzorka DNA.
6. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad uzimate uzorke DNA.

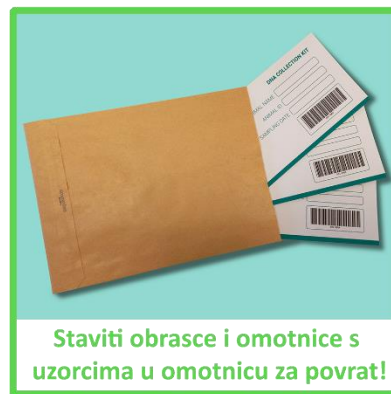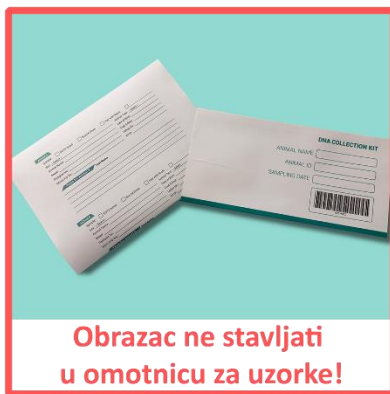

Uzimanje uzorka

1. Koristite dva štapića, jedan za svaki obraz.
2. Otvorite sterilni štapić na strani na kojoj je drška (nikako na strani vrha za sakupljanje uzorka). Oprezno otvarajte i izvadite štapić iz pakiranja da pritom ne dodirnete vrh.
3. Držeći štapić, postavite vrh štapića između unutrašnjosti obraza i desni i rotirajte barem 30 sekundi. Nježno pritisnite obraz izvana prema štapiću kako biste poboljšali sakupljanje stanica sluznice pošto one sarže DNA potrebnu za testiranje. Slina nije poželjan uzorak jer sadrži vrlo malo stanica.
4. Sušite štapić na zraku 15-20 minuta dok nije u potpunosti suh. Možete lagano mahati štapićem da se ubrza proces sušenja, ali NIKAKO ne pušite u štapić.
5. Umetnite štapić u priloženu kuvertu, označenu sa DNA COLLECTION KIT. Ne vraćajte štapiće natrag u originalno pakiranje!
6. Ponovite korake 2 do 5 s drugim štapićem na drugoj strani obraza i umetnite ga u istu kuvertu.
7. Zatvorite kuvertu i popunite podatke na vanjskoj strani.
8. U slučaju da uzorke ne šaljete odmah pohranite ih na 4°C do trenutka slanja, no uzmite u obzir da uspješnost testiranja puno veća ako je uzorak svjež.

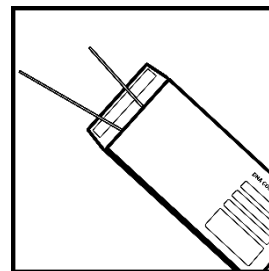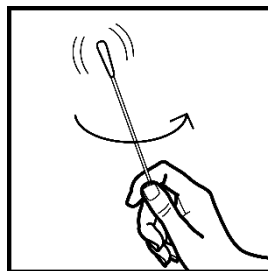

VAŽNO: Štapiće treba dobro posušiti i staviti direktno u kuvertu kako bi se smanjila bakterijska kontaminacija i izbjeglo razgrađivanje DNA (do bakterijske kontaminacije i razgradnje DNA dolazi ako se nedovoljno posušeni štapići vrate u originalno pakiranje).

Sending the sample

9. **Samo za naružbe izvan web-shopa:** Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
10. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“, „Obrazac za potvrdu veterinaru“ te kuvertu sa štapićima za uzimanje uzorka DNA u novu omotnicu te pošaljite na adresu:

AnimaLabs
Samoborska cesta 217/A
10 090 ZAGREB
HRVATSKA