

Upute za uzimanje uzoraka ljuske jajeta

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA ptice stranom DNA te kako bi kvaliteta i količina DNA bila zadovoljavajuća za potrebe testa.



Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

Priprema

1. Ako uzimate ljuske jajeta od više ptica, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka.
2. **UPOZORENJE:** ne dirajte unutrašnju stranu jajeta.
3. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad uzimate uzorke DNA. Uspješnost testiranja je puno veća ako je uzorak svjež.

Uzimanje uzorka

1. Uklonite ljusku jajeta čim se ptica izlegne.
2. Označite ljusku na vanjskoj površini kako bi spriječili zamjenu ljusaka.
3. Pažljivo očistite ljusku od izmeta navlaženim papirnatim ručnikom.
4. Ljuska jajeta se treba sušiti na zraku otprilike 24 sata i mora biti suha iznutra i izvana.
5. Stavite ljusku u malu kartonsku ili plastičnu kutiju kako se ne bi zdrobila prilikom transporta.
6. Na kutiju napišite identifikacijske podatke ptice.
7. Ako šaljete uzorke od više ptica, svaku ljusku stavite u posebnu kutiju.

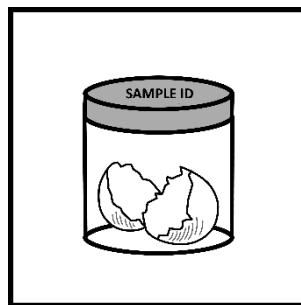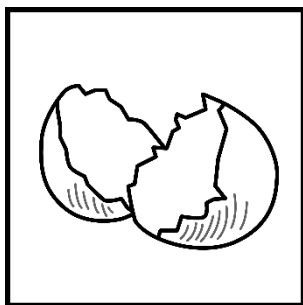

Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kutije s ljuskama u novu omotnicu/kutiju te pošaljite na adresu:

AnimaLabs
Samoborska cesta 217/A
10 090 Zagreb
Hrvatska