

Upute za uzimanje uzorka pera ptica

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA Vašeg ljubimca stranom DNA te kako bi kvaliteta i količina DNA bila zadovoljavajuća za potrebe testa.


Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

Priprema

1. Ako uzimate pera od više ptica, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka.
2. **UPOZORENJE:** Vrhove iščupanih pera nikako ne dodirujte prstima.
3. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad uzimate uzorke DNA.

Uzimanje uzorka

1. Iščupajte 5-10 pera sa prsa ili unutrašnje strane krila ptice. Nikako se čupati leteća i repna pera te ne slati slomljena pera bez vrha i pera koja su sama otpala.
2. Iščupana pera stavite u kuvertu.
3. Ako šaljete uzorke od više ptica, pera od svake ptice stavite u posebne kuverte.
4. Zatvorite kuvertu i na nju napišite identifikacijske podatke ptice.
5. U slučaju da uzorke ne šaljete odmah pohranite ih na 4°C do trenutka slanja, no uzmite u obzir da uspješnost testiranja puno veća ako je uzorak svjež.

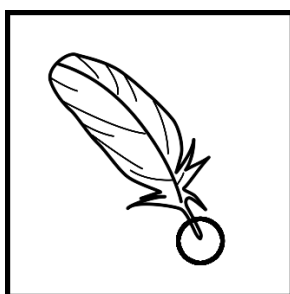

Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kuvertu sa perima u novu omotnicu te pošaljite na adresu:

AnimaLabs
Samoborska cesta 217/A
10 090 Zagreb
Hrvatska